

MATERASSO a DEPRESSIONE (manovra a TRE Soccorritori)

NOMINATIVO: _____ **Assoc.** _____ **Data:** _____

Istruzioni ai soccorritori:

LINEE GUIDA PER L'ESECUZIONE	✓
1. Stende il materassino al suolo facendo attenzione agli oggetti taglienti	
2. Distribuisce uniformemente le palline di polistirolo al suo interno eliminando le pieghe della tela	
3. Solleva il paziente con la barella a cucchiaio, coordinando l'équipe	
4. Depone il paziente sul materassino con la testa allineata al bordo superiore	
5. Toglie le valve della barella a cucchiaio mantenendo la stabilità del rachide	
6. Modella il materassino ai lati della testa, del tronco e degli arti, inserisce eventuale spessore tra i due arti inferiori	
7. Fa attivare la depressione del materassino e fissa le cinghie laterali	
8. Mentre si irrigidisce, modella ulteriormente il materassino intorno al paziente facendo attenzione di non coprire il volto	
9. Verifica la raggiunta rigidità del materassino e la tenuta della valvola di aspirazione	
10. Solleva il paziente stando ai lati (<i>ideale quattro soccorritori</i>) e lo trasporta sulla barella coordinando l'équipe.	
11. Posiziona il paziente nel materasso a depressione sopra la tavola "a cucchiaio" per il trasporto fino alla barella.	
12. Fissa il paziente e il materassino alla barella portantina	

PUNTI DI FORZA: _____

ASPETTI MIGLIORABILI: _____

INDICAZIONI/SUGGERIMENTI: _____